

Guía de Inicio Rápido



Monitor de presión arterial
Carditek Smart

Lee el **manual
completo**
escaneando
el QR:




NOTA: Verifique que la batería tenga la carga suficiente. De lo contrario, conecte el monitor a un conversor AC-DC con las especificaciones descritas en el manual.



1. Aplicación del brazalete:

Envuelva el brazalete alrededor del brazo que se va a medir, colocando el borde inferior del brazalete aproximadamente a 2-3 cm por encima de la articulación del codo, con el tubo de aire colocado en el lado interno del brazo

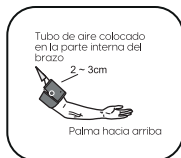

2. Postura de medición correcta

Siéntese derecho y mantenga el centro del brazalete a la misma altura que el corazón.



3. Medición de la presión arterial

Siéntese en silencio durante 5 minutos antes de la medición, luego presione el botón ON/OFF para comenzar.

Revisión del historial de mediciones:

Presione el MEM botón para ver los registros de presión arterial.

El monitor puede mostrar la última medición, el promedio de las tres lecturas más recientes y hasta 192 mediciones para dos usuarios.